

Как изглежда тестът за самостоятелно вземане?

Четката Evalyn е с дължина около 18 см и се състои от прозрачен корпус с крилца. В корпуса е разположена розова пръчица с розово бутало в единия край и бяла четка в другия. В краищата на четката върху корпуса може да се щракне розова капачка. Когато махнете капачката можете да извадите бялата четка извън корпуса като натиснете розовото бутало към прозрачния корпус.



Rovers Medical Devices B.V.
Lekstraat 10, 5347 KV Oss
Нидерландия
T +31 (0)412 648 870
info@roversmedicaldevices.com
www.roversmedicaldevices.com

evalyn[®]brush

Инструкции за теста за домашна употреба



Четката Evalyn[®] на Rovers[®] е патентован продукт и регистриран дизайн.

Rovers[®] и четката Evalyn[®] са регистрирани търговски марки на Rovers Medical Devices B.V., базирана в Ос, Нидерландия.

CE
0044

РЕФ 380500131

Версия EC-2021-03-BG



evalyn[®]brush

Четката Evalyn е стерилно изделие, което ви дава възможност да извършвате тестове сами в домашни условия. С помощта на четката Evalyn можете да вземете вагинален клетъчен материал лесно и безболезнено.


След това този клетъчен материал се анализира в професионална лаборатория.

Важни забележки

- Не използвайте, в случай, че опаковката на четката Evalyn е повредена или срокът на годност е изтекъл.
- Не използвайте по време на менструация.
- Не използвайте по време на бременност или три месеца след бременност.
- Не използвайте никакви други вагинални продукти поне два дни преди употреба на четката Evalyn. Вагиналните контрацептиви, презервативите и лубрикантите на водна основа могат да се използват нормално.
- Само за еднократна употреба.
- Повторната употреба може да доведе до инфекция и/или неправилна диагноза.



1 Измийте ръцете си преди употреба.

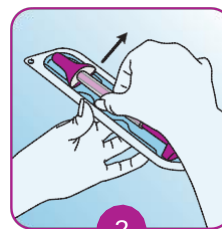


2 Извадете четката Evalyn от опаковката. Не изхвърляйте опаковката, тъй като тя ще е необходима за изпращане на четката Evalyn до лабораторията след употреба.




3 Натиснете двете страни на розовата капачка с палец и показалец, за да махнете розовата капачка от четката Evalyn. Не трябва да докосвате бялата част на четката Evalyn с ръцете си!




4 Вземете пробата, докато сте в изправено положение. Заемете удобна стойка (например като за поставяне на тампон).

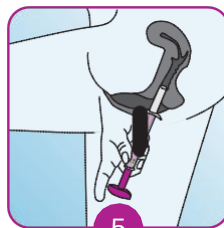


5 Разтворете срамните си устни с едната ръка, а с другата поставете четката Evalyn във влагалището си, докато крилцата докоснат срамните ви устни.

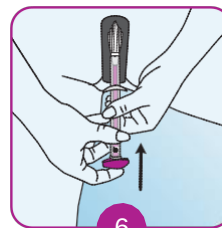


6 Дръжте прозрачния корпус с едната ръка, а с другата натиснете розовото бутало в посоката на прозрачния корпус. Ще чуete и усетите щракване, когато четката е в правилната позиция с розовото бутало точно срещу корпуса.

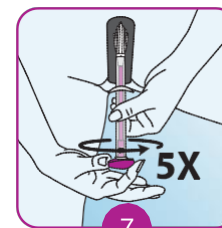

7 Завъртете розовото бутало пет пъти в една и съща посока. След всяко завъртане ще чувате щракване. Това ви помага да преброите завъртанията. След като завъртите буталото пет пъти, внимателно извадете четката Evalyn.

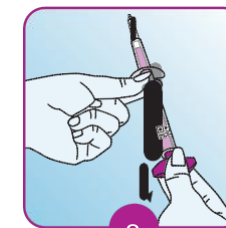


8 Дръжте прозрачния корпус с едната ръка, а с другата натиснете розовото бутало, докато бялата четка излезе в корпуса. Докато правите това, не докосвайте горната част на четката Evalyn над крилцата.

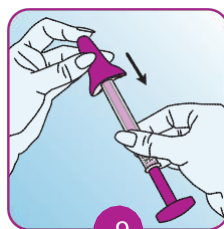

9 Дръжте прозрачния край, за да се уверите, че бялата четка няма да се удължи отново. Поставете розовата капачка обратно върху четката Evalyn с палеца и показалеца си. Ще чуete щракване, когато тя е поставена правилно на място.



10 Поставете четката Evalyn обратно в опаковката.

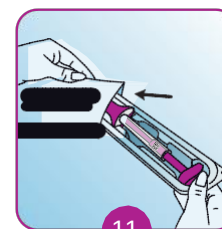

11 Поставете опаковката с четката Evalyn в нея в доставения плик и го запечатайте.



12 Използвайте плика за връщане, за да изпратите пробата, която съдържа четката Evalyn, заедно с цялата останала необходима информация.